

## 植込デバイスの創部圧迫バンド

県立姫路循環器病センターマスコット  
あじさリーナ

# ハート♥バンド



ペースメーカー・植込型除細動器の新規植込・交換の術後に使用する創部圧迫バンドです

- 伸縮ベルトで長さ調整可能
- 左右兼用



## ■ ハートバンド セット内容 (3点)

本体 (内ポケット 2箇所)



伸縮ベルト



ジェル



## ■ 使用方法

- ① 内側ポケットにジェルを入れて腕を通す
- ② 伸縮ベルトで前胸部と後背部を固定する
- ③ 右側植込みの場合は、反対側のポケットにジェルを入れる



- ・バンド使用中で違和感や痛みを感じた場合、その他皮膚のかぶれ等理由を問わず異常が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・必ず下着もしくは衣服の上に装着し、直接肌にあたらないようにしてください。

品名	規格	型式	JANコード	サイズ
ハートバンド	Mサイズ	5167-1230	4985697262428	腕回り ~30cm 胸囲 80-110cm
	Lサイズ	5167-1240	4985697262435	腕回り ~46cm 胸囲 90-120cm

## ■ 参考価格 3,000円 (税込 3,300円) / 個

参考文献：2015 年ペーシング治療研究会 兵庫県立姫路循環器病センター 田中奈緒子  
 圧迫バンドによるデバイス植込み術後の血腫予防効果について

参考文献：Kiuchi K, Okajima K, Tanaka N et al.

Novel Compression Tool to Prevent Hematomas and Skin Erosions After  
 Device Infection. Circ J2015;79:1727-2732

※本品は兵庫県立姫路循環器病センターと株式会社セルヴェンとの共同開発品です。

【お問合せ先】 宮野医療器株式会社 CV (Cardio Vascular) グループ

TEL : 078-302-7376 / FAX : 078-302-9302